

Staal	Hoeveelheid	Recipiënt	Fixatie	Bewaring na fixatie	Gedroogd preparaat	Opmerking
Stalen van de urinewegen: • urine • blaasspoeling • ureterspoeling • urethraspoeling	zie link	Cytolyt® buis 	zie link	zie link	Geen	• Midstream urine • Geen ochtend urine
Sputum	20 ml	Voorgevuld potje (oranje deksel)	Gebufferde formaldehyde 4% Zelfde hoeveelheid als het staal dat aanwezig is in het recipiënt (verhouding ½).	14 dagen op kamertemperatuur	Geen	
Stalen van de luchtwegen: • bronchus-aspiraats • BAL (broncho-alveolaire lavage) • bronchusborsteling	10 ml	Langwerpige potje met deksel 	Cytorich® RED Preservative Zelfde hoeveelheid als het staal dat aanwezig is in het recipiënt (verhouding ½).	4 weken op kamertemperatuur	Geen	

Vochten (pleuravocht, pericardvocht, ascitesvocht, peroperatieve spoelvochten van thoraxholte, peritoneale holte, douglasvocht) Van enkele vochten kan ook een grotere hoeveelheid opgestuurd worden voor het maken van een celblok. vermelden op aanvraagformulier	10 ml	Centrifugeer- buisje met stop 	Het staal zo snel mogelijk vers naar het labo verzenden		Geen	Het staal zo snel mogelijk vers naar het labo verzenden
Borstelingen: - o galwegen - o pancreaswegen - o papil van Vater	10 ml			4 weken op kamer-temperatuur	Geen	Borsteltje fixeren in recipiënt met fixatief
Fijne naald aspiraties van letsels in borst, long, maag, slokdarm, subcutis, schildklier	10 ml			4 weken op kamer-temperatuur	Geen	Afnamespuit uitspoelen met fixatievloeistof

Fijne naald aspiraties van letsels in speekselklieren, lymfeklieren	10 ml			4 weken op kamer-temperatuur	geen	Afnamespuit uitspoelen met fixatievloeistof
Lumbaalvocht		Centrifugeerbuisje met stop 	Vers gekoeld of onmiddellijk gefixeerd in centrifugeerbuisje met Cytorich® RED Preservative		Geen	Het staal zo snel mogelijk gekoeld naar het labo verzenden